


検体採取の手順

① 検体採取前の注意点

検体(唾液)の採取30分前から飲食、喫煙、歯磨き、口内洗浄はお控え下さい。

② キットの付属品の確認

キット開封前に手を洗い清潔にしてから開封して下さい。キットの付属品を確認して下さい。

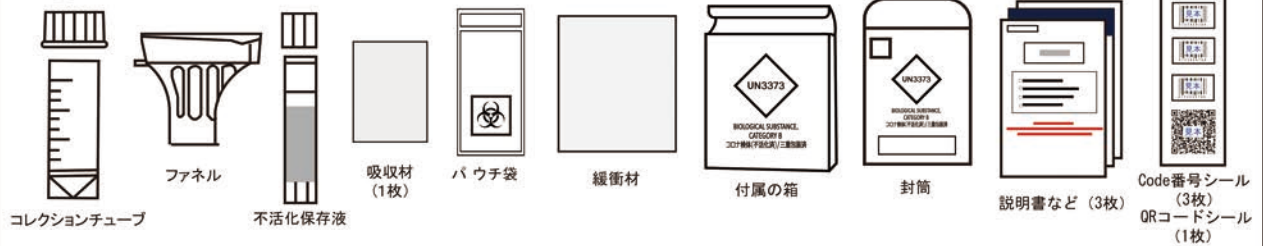

③ ファネルの取り付け・唾液の採取



コレクションチューブにファネルを取り付け唾液の採取を行います。
舌の先を器具の上部に押し付け、ゆっくり唾液を吐き出します。


唾液は2mLの目盛りまで入れてください。

※唾液中の泡は量として見なさないで下さい。

目盛がない場合は、底から2cm程度唾液を入れてください。

④ 不活化保存液の添加

不活化保存液をファネルからチューブに添加します。
この時ボトルに入っている不活化保存液は全て注いで下さい。

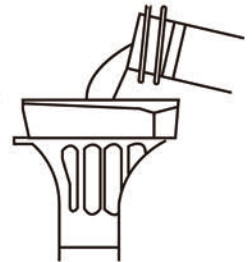

注意 不活化保存液の添加がされていない検体は検査を行う事が出来ません。
※改めて検査をご希望の場合、もう1キットのご購入となります。
その際に掛かる費用はお客様負担となりますので、予めご了承ください。

⑤ ファネルの取り外し (ファネルは必ず外して下さい)

チューブを縦に持ち、上のファネル部分を取り外します。

唾液の採取で使用したファネルは感染に注意して廃棄してください。



⑥ 不活化保存液と唾液を混ぜる


唾液漏れを防ぐため、キャップが十分に閉まっている事を確認してください。

キャップを締めたら10秒間ほど振り、不活化保存液と唾液を混ぜます。



⑦ Code番号シールを貼る

Code番号シールをチューブの外側にしっかりと縦にお貼りください。

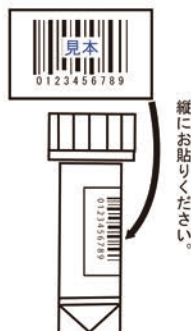

⑧ 検体の梱包

チューブを吸収材1枚で巻きパウチ袋に入れて密閉して下さい。




引き続き裏面の郵送の手順をご覧ください。

検体の梱包方法詳細は裏面をご覧ください

検体郵送の手順

⑨箱に梱包

検体を緩衝材で包んでから付属の箱の中に入れてください。

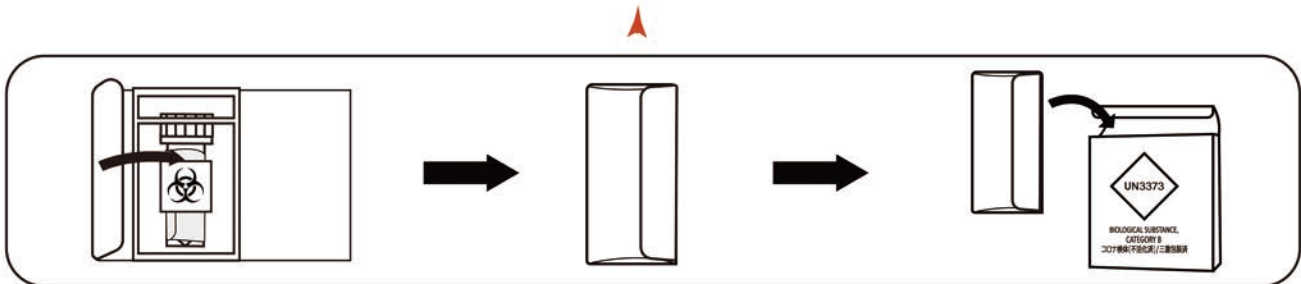

⑩返送用封筒に梱包

同梱の返送用封筒に、①検体の入っている箱
②本人確認ができる書類のコピー
③返送書類
を入れて、中身が外に出ないようにしっかりと封を閉じてください。

⑪返送 郵便局に出してください

到着日時、検査開始日・完了日のお問い合わせには、お答えする事が出来ません。
当院への到着目安を、ご確認したい方は、直接郵便局までお問い合わせください。

⑫郵送期間

郵便局に出してください。



普通郵便は、土日祝日の配達がありません。

お急ぎの方は、**速達**等でお送りください。
速達費用は、お客様でご負担ください。

【注意事項】

ご返送の際には、本人確認ができる書類のコピーを必ず入れてください。

※ 本人確認ができる書類のコピーが同梱されていない場合、検査を行う事が出来ません。

販売

ナガワ薬品株式会社

PCRお問い合わせ番号：080-3213-9188


お客様控え

※検査結果が出るまで
必ずお手元で保管してください。

PCR検査の流れ

この度は、PCR検査サービスをご利用いただき有難うございます。

本PCR検査は、検体中の新型コロナウイルスに特徴的なRNA遺伝子を検出(陽性・陰性と判定)するものであり新型コロナウイルス感染の有無を診断するものではありません。説明書をよくお読み頂き、情報入力の際はくれぐれも記入漏れ・記入間違いの無いよう再度ご確認ください。

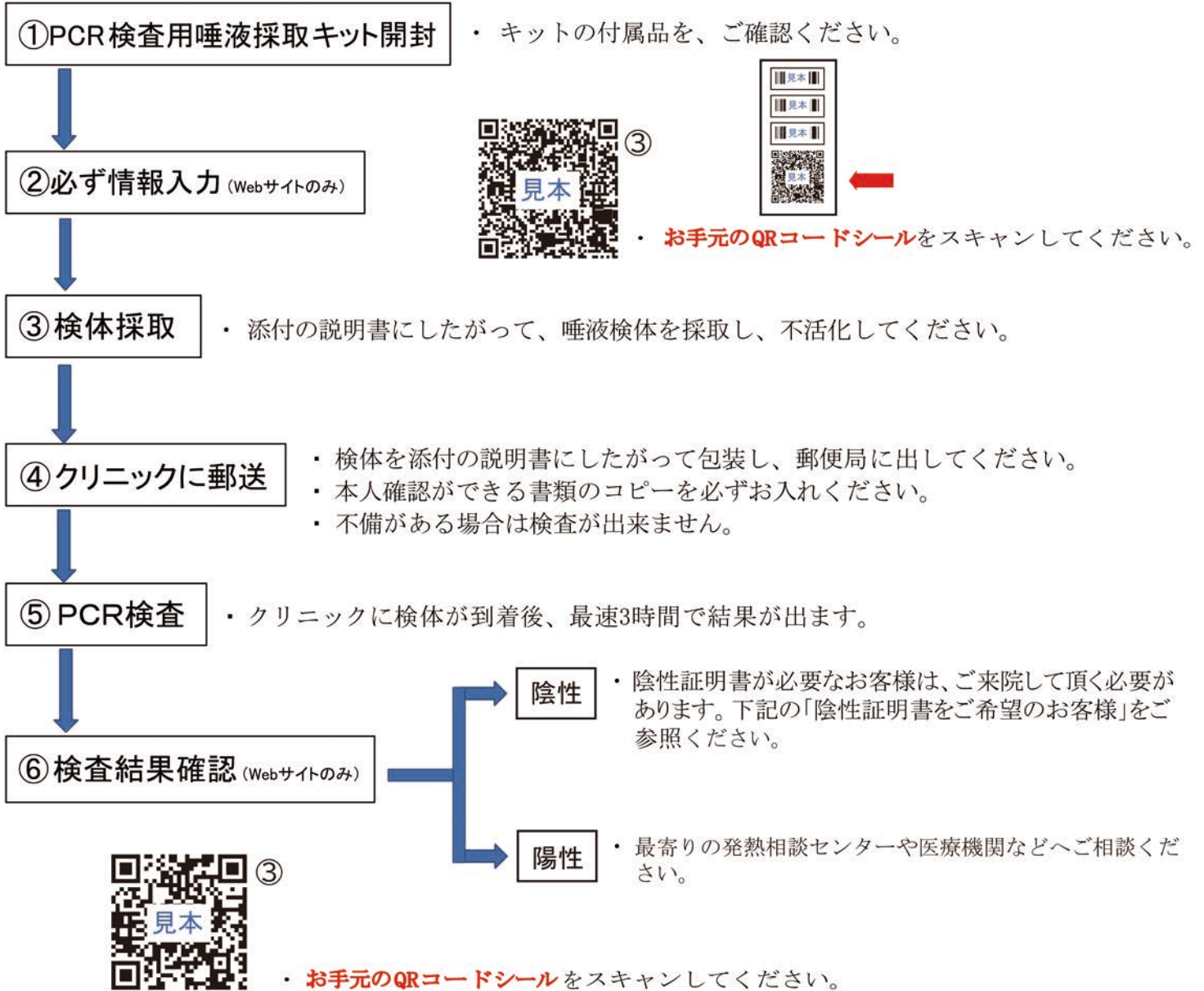

陰性証明書をご希望のお客様

陰性証明書の発行には検体採取日・検体採取時間が必要です。発行をご希望されるお客様は必ず検体採取日時を来院の際にお伝えください。
PCR検査キットをクリニックに持ち込んで検体採取されても構いません。
発行手数料を別途頂戴いたします。
渡航用 税込5,000円
日本国内用 税込4,000円

PCRお問い合わせ番号：080-3213-9188

受付期間 平日:10:00-17:00 (土・日・祝日 休み)

【重要】 ※引き続き裏面の説明をご覧ください。